

Dilatan plus 3 ks, ø 20, 23, 27 mm

A.1003

Anální kryotermální dilatátor se vyrábí ve třech velikostech.

Je účinný u patologických stavů, jako jsou: zácpa, jizevnaté stenózy, u hypertonií, hemoroidů, fissur a u proktalgii.

PRO ZMÍRNĚNÍ HEMOROIDÁL- NÍCH OBTÍŽÍ!



MOŽNOSTI POUŽITÍ:

- Při kryoterapii se dilatátor zchladí v lednici až na 0 °C.
- Při termoterapii se dilatátor může zahřát v teplé vodě na maximální teplotu 50 °C.

DILATAN solo

1 ks, ø 20 mm
Katalogové číslo: **A.1020**

DILATAN solo

1 ks, ø 23 mm
Katalogové číslo: **A.1023**

DILATAN solo

1 ks, ø 27 mm
Katalogové číslo: **A.1027**

DILATAN solo

1 ks, ø 30 mm
Katalogové číslo: **A.1030**

DILATAN ANÁLNÍ, KRYOTERMICKÝ

Sada 3 kusy. Průměr 20, 23 a 27 mm.

CENA VČ. DPH

887 Kč

POUŽITÍ DILATANŮ PRO...

1

ANÁLNÍ TRHLINY

dilataci

2

chladovou terapii ❄️

HEMOROIDY

kryoterapii ❄️

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Zahřejte dilatátor pod teplou tekoucí vodou (ne přes 50 °C) v případě hypertonu nebo bolestivého spazmu. Vychladte dilatátor v lednici (ne pod 0 °C) v případě análního krvácení.
2. Potřete dilatátor krémem nebo lubrikační masťou.
3. Zasouvejte dilatátor velmi pomalu do análního otvoru až po jeho bazi, vsedě na bidetu nebo vleže na posteli, je jedno zda před nebo po defekaci.
4. Ponechejte dilatátor takto 1–3 minuty v souladu s lékařským doporučením.
5. Vytáhněte jej pomalu ven. **UPOZORNĚNÍ:** v souladu s lékařským doporučením opakujte dilataci jednou až dvakrát denně, minimálně po dobu jednoho měsíce. Následující fáze, rovněž pod dohledem specialisty, spočívá v zavedení dilatátoru s větším průměrem po stejnou dobu a stejně často.
6. Umyjte dilatátor teplou vodou a neutrálním mýdlem a v případě nutnosti na několik hodin ponořte dilatátor do dezinfekčního roztoku.
7. Usušte dilatátor a pečlivě uložte zpět do krabičky.

UPOZORNĚNÍ: v případě, že výrobek není v perfektním stavu, nebo je obal poničený, prosíme o zaslání výrobci, číslo šarže a den výroby, natištěné na obalu.



**PRODUKT JE URČEN POUZE
PRO JEDNOHO PACIENTA!**

A.1001, A.1002, A.1003,
A.1020, A.1023, A.1027,
A.1030



+420 602 506 806

